

Рекомендуемые режимы лечения глазных болезней с использованием аппарата ЛАСТ-1

Острые воспалительные состояния переднего отрезка глаза и вспомогательного аппарата

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние (см)	5	5	10	10	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Частота	0	0	1	1	1	5	5	10	10	10
Экспозиция в мин	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Гемофтальм передней камеры

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние (см)	5	5	10	10	10	10	10	20	20	20
Диафрагма	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Частота	1	1	1	5	5	5	10	10	10	10
Экспозиция в мин	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7

Острый конъюнктивит

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние (см)	5	5	5	10	10	10	20	20	20	20
Диафрагма	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Частота	0	0	1	1	5	5	10	10	10	10
Экспозиция в мин	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7

Хронический конъюнктивит

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние (см)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Диафрагма	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4
Частота	1	1	1	5	5	5	10	10	10	10
Экспозиция в мин	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Хориоретинит

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние (см)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
Частота	1	1	1	5	5	5	10	10	10	10
Экспозиция (мин)	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5

Амблиопия слабой и средней степени

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние в см	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
Частота	0	0	0	1	1	1	5	5	10	10
Экспозиция (мин)	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4

Амблиопия высокой степени

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние в см	10	10	10	15	15	15	20	20	20	20
Диафрагма	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4
Частота	1	1	1	5	5	5	10	10	10	10
Экспозиция (мин)	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Дистрофические поражения сетчатки

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние в см	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Частота	1	1	1	5	5	5	10	10	10	10
Экспозиция (мин)	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7

Атрофия зрительного нерва

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние в см	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Частота	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10
Экспозиция (мин)	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7

Миопия слабой и средней степени

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние (см)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
Частота	0	0	0	1	1	1	5	5	5	5
Экспозиция (мин)	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4

Врожденная миопия высокой степени

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расстояние в см	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Диафрагма	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
Частота	1	1	1	5	5	5	10	10	10	10
Экспозиция (мин)	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5

Высокая осложненная миопия (сочетании с магнитотерапией)

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7
Расстояние в см	15	15	15	15	15	15	15
Диафрагма	2	2	3	3	4	4	4
Частота	1	1	1	5	5	10	10
Экспозиция (мин)	2	2	2	3	3	4	4

**Постоперационные, посттравматические и постконтузионные состояния
глазного яблока с отечным синдромом(в сочетании с магнитотерапией)**

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7
Расстояние в см	10	10	10	15	15	15	15
Диафрагма	2	2	3	3	3	4	4
Частота	1	1	5	5	5	10	10
Экспозиция (мин)	3	3	3	4	4	4	4

Диабетическая ретинопатия в отсутствии кровоизлияний, пролифератов

Параметры \ Сеанс	1	2	3	4	5	6	7
Расстояние в см	15	15	15	15	15	15	15
Диафрагма	2	2	2	2	3	3	3
Частота	5	5	5	5	10	10	10
Экспозиция (мин)	2	2	2	3	3	4	4